

Esitäytetty monipistoskynä
GONAL-f[®] -kynä


Neljä vahvuutta

150 IU, 300 IU, 450 IU ja 900 IU



Näin käytät **esitäytettyä** GONAL-f-monipistoskynää


Vain 3 vaihetta

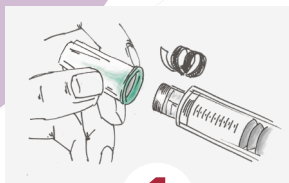

1

Neulan kiinnitys

- Irrota kynän korkki.
- Varmista, että annosnäytössä näkyy 0.
- Poista irtirepäistävä suojapaperi ulommaisesta neulasuojuksesta.
- Kierrä esitäytetyn GONAL-f-kynän kierrekärkeä ulompaan neulasuojukseen niin kauan, että tuntuu lievää vastusta. Älä kiinnitä neulaa liian tiukasti – neula voi olla vaikea irrottaa pistoksen jälkeen.

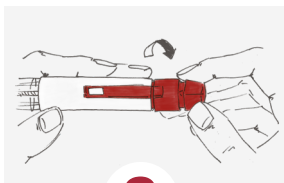

2

Annoksen asettaminen

- Käännä annosvalitsinta niin kauan, että lääkärin määräämä annos näkyy annosnäytössä. Voit säätää annosta 12,5 IU välein.
- Mikäli tarpeellista, korjaa annosta kääntämällä annosvalitsinta taaksepäin.
- Tarkista aina ennen pistosta, että annosnäytössä näkyy oikea annos.



3

Annoksen pistäminen

- Työnnä neula hitaasti ihoon 90° kulmassa.
- Paina annosvalitsin niin pitkälle kuin se menee. Mitä suurempi annos, sen kauemmin pistäminen kestää. Pidä annosvalitsinta alhaalla vähintään 5 sekuntia. Annosnäytön lukema on taas 0.
- Vedä neula ulos ihosta samalla kun pidät annosvalitsinta alas painettuna.
- Ihoärsytyksen välttämiseksi kierrätä pistospaikkoja.

Huomioitavia asioita

Hävitä aina neulat ohjeistusten mukaisesti.
Kysy tarvittaessa lisätietoja lääkäriltäsi
tai apteekista.

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ
NEULAA UUELLEEN

Säilytys:

JÄÄKAAPPI

4 °C ❄️



25 °C
15 °C

Kirjoita ylös ensimmäinen kynän käyttöpäivä. Kun pakkaus on avattu, esitäytettyä
kynää saa säilyttää korkeintaan 28 päivää jääkaapin ulkopuolella (lämpötilassa 25 °C).

Älä käytä valmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP/Käyt. viim.) jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä valmistetta, mikäli huomaat lääkeaineessa hiukkasia tai sameutta.



hedelmöityshoito.fi



Tästä
pääset
suoraan
kirjautumis-
sivulle

**Sivustolla lisätietoja
GONAL-f-valmisteesta
ja käyttöohjevideo**

Kirjaudu sivustolle lääkepakkauksesta
löytyvällä kuusinumeroisella
VNR-numerolla.

FL-GON-00038

