


Förfylld flerdospenna
GONAL f[®] injektionspenna

Fyra styrkor
150 IU, 300 IU, 450 IU och 900 IU



Så här använder du den förfyllda flerdospennan GONAL-f


Endast 3 steg

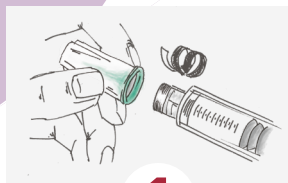

1

Anslut nålen

- Ta av skyddet till injektionspennan.
- Kontrollera att doseringsfönstret är inställt på "0".
- Ta av det avdragbara skyddspappret från det yttre nålskyddet.
- Skruva fast det yttre nålskyddet på den gängade spetsen på injektionspennan tills du känner ett lätt motstånd. Dra inte åt nålen för hårt – den kan då vara svår att ta bort efter injektionen.

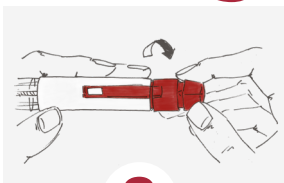

2

Ställ in dosen

- Vrid dosknappen tills dosen som läkaren har ordinerat visas i doseringsfönstret. Du kan reglera dosen i steg om 12,5 IU.
- Om det behövs kan du vrida dosknappen bakåt för att korrigera dosen.
- Kontrollera alltid att rätt dos visas i doseringsfönstret innan du injicerar.



3

Injicera dosen

- Stick in nålen långsamt i huden i 90 graders vinkel.
- Tryck in dosknappen så långt det går. Ju större dos, desto längre tar det att injicera den. Håll dosknappen intryckt i minst 5 sekunder. Siffran doseringsfönstret återgår till "0".
- Dra ut nålen ur huden samtidigt som du håller dosknappen intryckt.
- Välj olika injektionsställen varje gång för att undvika hudirritation.

Saker att tänka på

Kassera alltid nålarna enligt anvisningarna.
Be din läkare eller apotekspersonalen om mer information vid behov.

ANVÄND INTE NÅLEN IGEN

Anteckna datumet när du använder injektionspennan första gången. När förpackningen har öppnats får den förfyllda injektionspennan förvaras i högst 28 dagar utanför kylskåp (vid 25 °C).

Används före utgångsdatum (EXP/Utg.dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Använd inte preparatet om du märker att vätskan är grumlig eller innehåller partiklar.

Förvaring:

Kylskåp

4 °C



25 °C
15 °C



hedelmöityshoito.fi



Härifrån
kommer du
direkt till
inloggnings
sidan

På webbplatsen finns mer information om GONAL-f och en instruktionsfilm

Logga in på webbsidan med den sexsiffriga VNR-koden som finns på läkemedelsförpackningen.



FL-GON-00039