

Pergoveris™

(follitropin alfa and lutropin alfa for injection)



Предварительно заполненные
шприц-ручки Pergoveris

Как пользоваться шприц-ручкой Pergoveris

Только 3 шага



1

Присоединение иглы

- Снимите колпачок со шприц-ручки
- Убедитесь, что в индикаторном окошке дозы видна цифра 0
- Удалите защитный ярлычок с внешнего колпачка иглы
- Ввинтите шприц-ручку Pergoveris резьбовым наконечником во внешний колпачок иглы, поворачивая наконечник до тех пор, пока не почувствуете легкое сопротивление. Не присоединяйте иглу слишком плотно – ее будет трудно отсоединить после инъекции.



2

Установка дозы

- Вращайте селектор дозы до тех пор, пока в индикаторном окошке не появится доза, назначенная Вам лечащим врачом. Вы можете регулировать дозу в пределах 12.5 IU.
- При необходимости дозу можно откорректировать, вращая селектор дозы в обратном направлении.
- Перед инъекцией всегда необходимо убедиться, что в индикаторном окошке видна правильная доза.



3

Введение дозы

- Медленно введите иглу под кожу под углом 90 градусов.
- Нажмите на селектор дозы до упора. Чем больше доза, тем дольше длится процесс ее введения. Удерживайте селектор дозы в нажатом положении не менее 5 секунд. В индикаторном окошке опять появится цифра 0.
- Удалите иглу из-под кожи, продолжая нажимать до упора на селектор дозы.
- Для предотвращения раздражения кожи необходимо менять места введения инъекции.

Pergoveris™

(follitropin alfa and lutropin alfa for injection)



Предварительно заполненные
шприц-ручки Pergoveris

Безопасность

Утилизируйте использованные иглы всегда в соответствии с инструкциями. За дополнительной информацией при необходимости обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

ИСПОЛЬЗОВАННУЮ ОДИН РАЗ ИГЛУ НИКОГДА НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВТОРНО

Хранение:



Отметьте дату первого использования шприц-ручки. После того, как упаковка будет открыта, предварительно заполненную шприц-ручку можно хранить не более 28 суток вне холодильника (при температуре 25 °C).

Не используйте препарат после истечения срока годности (EXP/Käyt. Viim – Использовать до). Дата последнего использования означает последний день месяца. Не используйте препарат, если заметите в нем частицы или мутность.

Merck Oy
Keilaranta 6, 02150 Espoo
www.merck.fi

FI/PER-00004

MERCK